

Dräger DrugTest® 5000 Наркотестер

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest® 5000. Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.



Преимущества

Тест на наркотики с отбором проб и анализом в одной системе

Система тестирования на наркотики Dräger DrugTest 5000 состоит из тест-кассеты Dräger DrugTest 5000 Test Kit и анализатора Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Эта система предоставляет вам все необходимое для скрининга как в медучреждении, так и на объекте. Dräger DrugTest 5000 сразу покажет, находится ли человек под действием наркотиков.

Готов к немедленному использованию

Тест-кассеты Dräger DrugTest 5000 всегда готовы к использованию. Хотите проверить подозреваемого? Просто снимите крышку и передайте пробоотборник испытуемому.

Простое и безопасное управление

Для управления анализатором вам понадобятся всего три кнопки. Выбор операции осуществляется через меню. Просто следуйте текстовым инструкциям на дисплее.

Гигиеничный и безболезненный пробоотбор слюны

Испытуемый вводит верхнюю часть пробоотборника в ротовую полость и совершает жевательные движения, пока встроенный индикатор не становится синим, что сигнализирует о завершении пробоотбора. Обычно это занимает от одной до четырех минут. Затем испытуемый возвращает вам закрытую тест-кассету, что гарантирует отсутствие контакта с пробой слюны.

Мгновенные результаты

Анализ слюны начинается сразу после пробоотбора, достаточно вставить тест-кассету и картридж в анализатор. Все операции выполняются автоматически, позволяя вам дальше заниматься испытуемым. Через несколько минут на экране появится результат.

Точные результаты

Результат измерения отображается в виде полнотекстовых сообщений, благодаря чему невозможно двусмысленное толкование. Более подробная информация может быть добавлена с помощью внешней клавиатуры, сохранена или распечатана с помощью Dräger Mobile Printer (опция).

Дополнительные преимущества Dräger DrugTest 5000 Test Kit:

- высокая степень совпадения с результатами анализа образцов крови и пределы обнаружения, актуальные для Германии (подтверждено полевыми испытаниями Немецкого университета полиции)
- низкий предел обнаружения для ТНС как основного активного вещества каннабиноидов
- простое управление – даже при работе в перчатках

Преимущества

- работает от напряжения 230 В или 12 В автомобильной сети
- легко транспортируется, весит 4,5 кг (в наличии имеется сумка для переноски или прочный кейс для транспортировки)
- наличие различных конфигураций (возможность одновременного выявления нескольких веществ в зависимости от типа тест-кассет)
- возможность эксплуатации при температуре от 4 до 40 °С
- возможность хранения в оригинальной упаковке при температуре до 30 °С

Надежный скрининг наркотиков

Система может обнаруживать до восьми веществ/классов веществ с заранее определенными пределами обнаружения (пороги):

- амфетамины
- бензодиазепины
- дельта-9-тетрагидроканнабиол (THC (каннабис))
- кокаин
- метамфетамины
- опиаты
- метадон
- кетамин

Dräger SSK 5000: для обнаружения наркотиков на поверхностях или в веществах

Хотите проверить автомобиль на наличие следов от наркотиков или изучить содержимое подозрительного пакета? Просто возьмите пробу с помощью Dräger SSK 5000 и перенесите её в тест-кассету Dräger DrugTest 5000 Test Kit. Затем вы можете исследовать пробу в анализаторе Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	12 В
Ток	3 А
Размеры (Ш x В x Г)	200 x 260 x 250 мм
Вес	4,5 кг
Рабочие условия	Эксплуатация: от 4 до 40 °С при хранении/транспортировке: от -20 до +60 °С отн. влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)
Интерфейсы	оптический для принтера, PS/2, USB Slave
Время измерения:	зависит от используемого тест-комплекта (обычно < 9 минут) опционально: анализ за < 5 минут при повышении порогового значения ТНС до 25 нг/мл (после обновления программного обеспечения прибора)
Емкость памяти	500 результатов измерения
Аттестации	ПУ ФСЗ 2009/05877 ГОСТ Р 52319-2005; ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 50444-92

Спецификация заказа

Описание	IVD/ Non-IVD	Упаковка	Код заказа
Анализатор с блоком питания (83 15 675) и автомобильный кабель 12 В	IVD	1 анализатор	83 19 900
Анализатор с блоком питания (83 15 675)	Non-IVD	1 анализатор	83 23 605
Испытательный комплект для 8 веществ* СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ, МТD, КЕТ	IVD	20 шт.	83 23 646
Испытательный комплект для 7 веществ* СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ, МТD	IVD	20 шт.	83 23 156
СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ, МТD	Non-IVD	20 шт.	83 23 636
Испытательный комплект для 6 веществ* СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ	IVD	20 шт.	83 19 830
СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ	Non-IVD	20 шт.	83 19 965
Испытательный комплект для 5 веществ *СОС, ОРІ, ТНС, АМР, МЕТ	IVD	20 шт.	83 23 439
СОС, ОРІ, ТНС, АМР, МЕТ	Non-IVD	20 шт.	83 21 350
Испытательный комплект для обучения (6 тест-кассет каждый) Учебный испытательный комплект		6 шт.	83 23 640

Спецификация заказа

(3 x положительных;
3 x отрицательных)

Dräger SSK 5000	20 шт.	83 20 490
Компактная клавиатура, немецкая раскладка („QWERTZ“)	1 шт.	83 15 095
Компактная клавиатура, английская раскладка („QWERTY“)	1 шт.	83 15 497
Компактная клавиатура, французская раскладка („AZERTY“)	1 шт.	83 15 142
Сканер штрих-кода	1 шт.	AG 02 491
Портативный принтер Dräger Mobile Printer	1 шт.	83 19 310
Транспортировочный кейс для анализатора DrugTest® 5000 и принадлежностей	1 шт.	83 22 675
Жесткий транспортировочный кейс для анализатора DrugTest® 5000 Analyzer	1 шт.	83 25 333
*СОС: кокаин – *ОПИ: опиаты – *ВЗО: бензодиазепины – *ТНС: марихуана – *АМФ: амфетамин – *МЕТ: метамфетамины – *МТД: метадон – *КЕТ: кетамин		

Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электrozаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

